


Pos	Antal	Art.nr.	Beskrivning	Pos.	Antal	Art.nr.	Beskrivning	Pos.	Antal	Art.nr.	Beskrivning
1	1	9300-207	Pedalrem, par	21	1	1069-5	.Styrplugg	41	1	9384-70	Sidokåpa, höger
2	1	9300-210	Pedal, par	22	1	9100-109	Låsspak	42	1	9300-5	Stödben, främre
3	1	8523-2	Dammskydd	23	1	9300-291	Expanderkil	43	4	5844	Låsmutter
4	4	8523-115	Skruv, M6S 8 x 20 fzb	24	1	5866	Bricka	44	1	5683	Skruv
5	1	9300-401	Vevsats 52T, Sugino kpl.	25	1	9384-39	Tryckknapp	45	2	5673-9	Skruv
6	1	8966-175	Kasettvevlager, Shimano	26	1	9384-41	Instrumentkåpa	46	1	5681	Skruv
7	1	9300-133	Låsskruv, kpl.	27	2	5675-9	Skruv	47	1	5671-19	Skruv
8	1	9300-134	.Tryckbricka m. O-ring	28	1	9384-71	Sidokåpa, vänster	48	2	9302-28	Plastplugg
9	1	9300-123	Toppkåpa	29	1	9300-3	Svånghjul m. frikrans	49	1	9300-6	Stödben, bakre
10	1	9300-115	Sadelrörsbussning	30	1	9000-17	.Distanshylsa, 5 mm	50	2	9300-12	Skruv
11	1	9300-112	Sadelstolpe	31	1	9000-17	.Distanshylsa, 23 mm	51	1	9300-55	Kedja, 116 länkar
12	1	9326-164	Magnet	32	1	9000-15	.Låsring, SgH 28	52	1	9301-2	Ram
13				33	2	19001-6	.Kullager, 6001-Z	53	1	9374-60	Fästplåt
14				34	2	5799	.Mutter	54	4	5843-9	Mutter
15	1	9300-100	Sadel	35	1	9000-12	.Kedjesträckare, par	55	1	9374-29	Vikthållare
16	1	5466	Sadelklamman	36	1	9300-18	.Axel	56	1	9374-9	Belastningsram
17				37	1	9106-13	.Frikrans, 14T	57	2	9000-29	Transporthjul, kpl.
18				38	1	9106-14	.Anslutning	58	1	1109	Kedjelås
19				39	4	9300-7	Stödfot	59			
20	1	9300-270	Styre, kpl.	40	10	9306-12	Plastplugg	60			

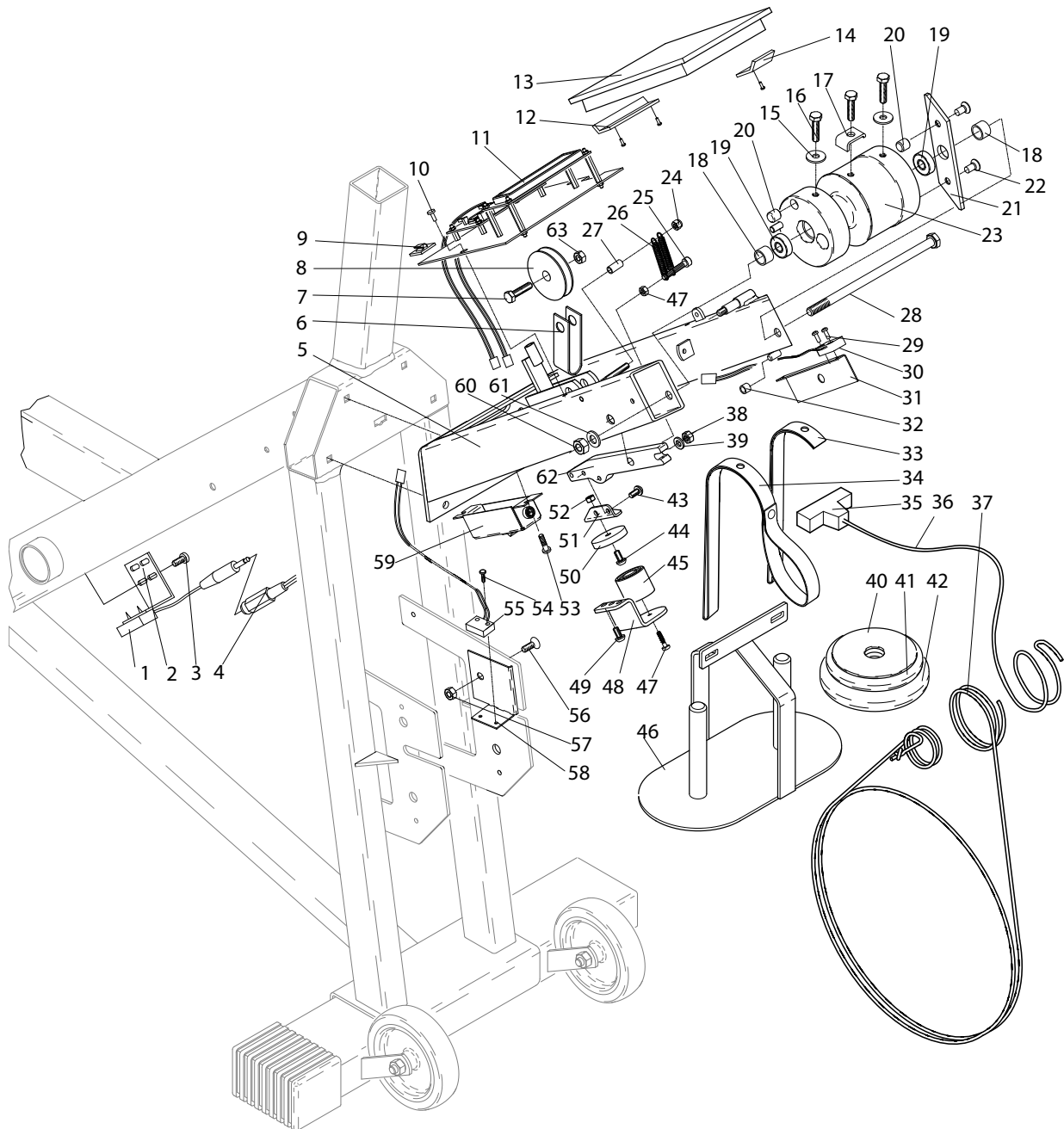

Pos	Antal	Art.nr.	Beskrivning	Pos.	Antal	Art.nr.	Beskrivning	Pos.	Antal	Art.nr.	Beskrivning
1	1	9326-162	Sensor	25	1		Skruv	49	3	5670	Skruv
2	1	9326-166	Sensorfäste	26	2		Fjäder	50	1	9384-34	Platta
3	2	9326-59	Skruv	27	1		Distanshylsa	51	1	9384-37	Fäste
4	1	9326-263	Skarvkabel	28	1	14374	Skruv	52	1		Mutter
5	1	9374-9	Belastningsram	29	4	9103-41	Skruv	53	4	5675-9	Skruv
6	1	9384-26	Linbygel	30	2	9326-270	Sensor m.kabel 390 mm	54	2	9103-41	Skruv
7	1	14327	Skruv	31	2	9374-22	Sensorfäste	55	1	9326-169	Sensor m.kabel 620 mm
8	1	9384-27	Linhjul	32	1	9374-12	Dämpare	56	1	14380	Skruv
9	4		Kabelklamma	33	1		Upphängningsrem	57	1	5843-9	Låsmutter
10	4	5675-9	Skruv	34	1		Upphängningsrem	58	1	9374-24	Sensorfäste
11	1	9384-10	Elektroniksats	35	1	9384-29	Handtag	59	1	9374-23	Kontaktfäste
12	1	9374-172	Fästbleck	36	1		Utlösningsslina	60	1	5844	Låsmutter
13	1	9374-170	Digitalmätare	37	1		Bromslina	61	1	5864	Bricka
14	1	9374-171	Fästbleck	38	1		Mutter	62	1	9384-33	Magnetarm
15	2	5862	Bricka	39	1		Bricka	63	1		Låsmutter
16	3	14323-9	Skruv	40	4	9102-30	Vikt 0,1 kg				
17	1	9324-70	Låsbricka	41	1	9102-27	Vikt 0,5 kg				
18	2	9127-37	Distanshylsa	42	4	9102-26	Vikt 1 kg				
19	2	19088-6	Kullager	43	2		Skruv				
20	2	9374-16	Magnet	44	1		Skruv				
21	1	9374-21	Lägesstopp	45	1	9384-32	Elektromagnet				
22	2	14379	Skruv	46	1	9324-25	Viktkorg 1 kg				
23	1		Spänncentrum	47	1		Skruv				
24	1		Låsmutter	48	1		Magnetfäste				