



Fr. o. m. tillverkningsnummer P 93308.

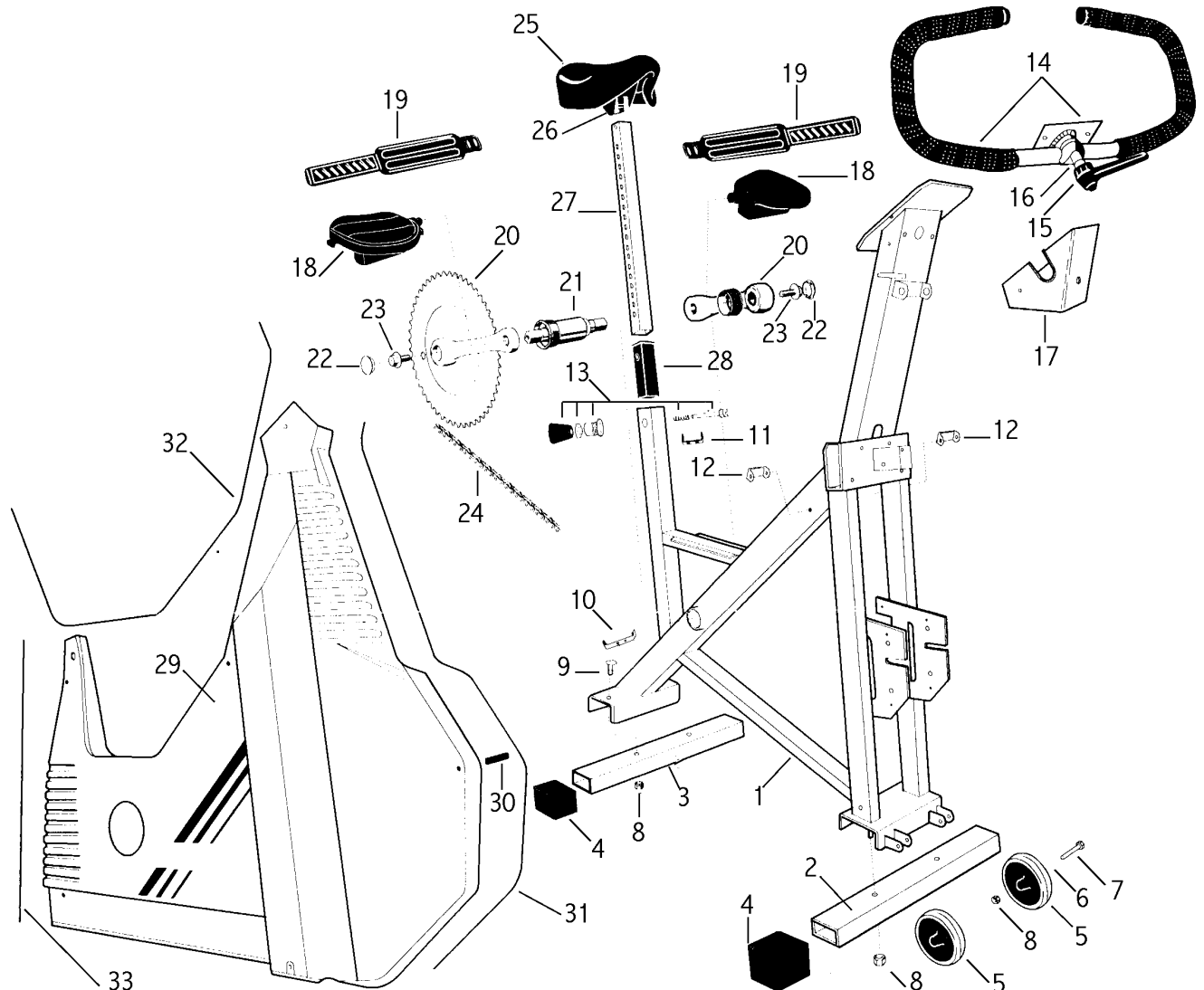

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr	Benämning
9304-3	1	1	Ram	8966-175	1	21	Kassettvevlager, komplett
9300-5	1	2	Stödrör, fram	8523-2	2	22	Plastknopp
9300-6	1	3	Stödrör, bak	8523-115	2	23	Skruv M6S 8.8 M8 x 1 x 20 FZB
9300-7	4	4	Stödfot, blå	9300-55	1	24	Kedja 116 länk
9305-27	2	5	Transporthjul	1109	1		.Kedjelås
9000-28	2	6	Lagerbussning för d:o	4992-7	1	25	Sadel, blå
14359	2	7	Fästbult för d:o	9300-114	1	26	Sadelklamman
5844	2	8	Låsmutter M8	9300-113	1	27	Sadelstolpe
9300-12	2	9	Skruv MVBF M8 x 16 mm	9300-115	1	28	Bussning för d:o
9305-82	1	10	Kåpfäste, bak	9305-81-6	1	29	Ramkåpa komplett, höger
9305-83	1	11	Kåpfäste, sadelrör	5673-9	5		.Fästskruv, LKT-TT, 5 x 12 mm
5675-9	4		.Fästskruv 5 x 6,5 mm, rostfri	5671-19	2		.D:o, LKT M5 x 18 mm
9305-84	4	12	Kåpfäste, ramrör	9305-80-6	1		Ramkåpa komplett, vänster
14311	1		.Fästskruv M6S, M5 x 50 mm, fzb	5673-9	5		.Fästskruv, LKT-TT, 5 x 12 mm
5842-9	1		.Låsmutter M5	5671-19	2		.D:o, LKT, M5 x 18 mm
9305-118	1	13	Låssprint komplett	9305-87	1	30	Styrning för ramkåpor
9305-66	1	14	Styre komplett med klove	9305-88	1	31	Aluminiumlist, främre
14359	1	15	Fästbult	9305-89	1	32	D:o, övre
9000-16	1	16	Distans 16 mm	9305-90	1	33	D:o, bakre
9305-919	1	17	Styrkåpa				
74435	1	18	Pedal 9/16", par				
76424	1	19	Rem för pedal, per par				
9300-401	1	20	Vevsats komplett, 52T				

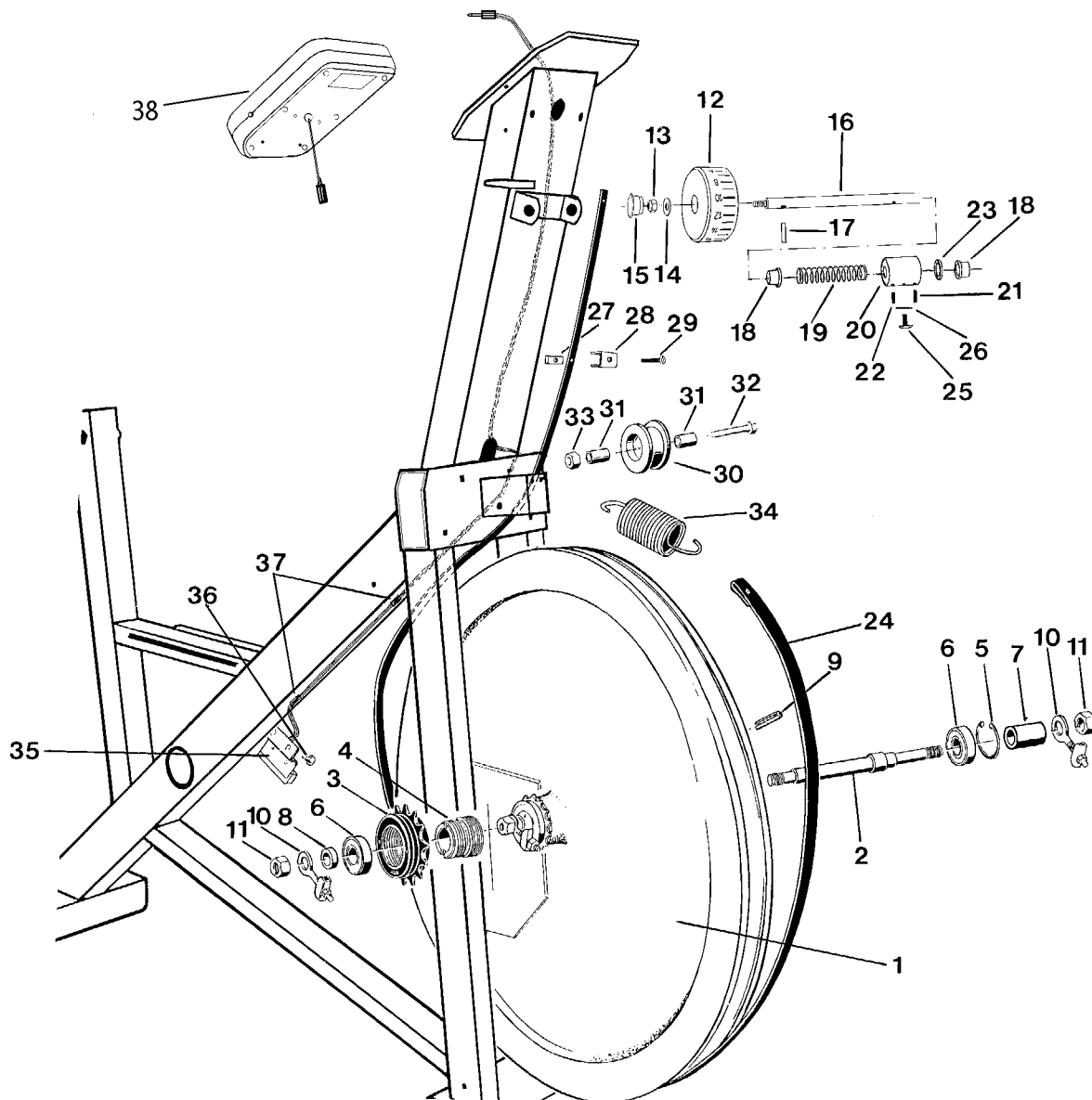

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9300-4	1	1	Bromshjul komplett	9304-617	1	24	Bromsrem komplett
9300-18	1	2	Axel, 132 mm	5675-9	1	25	Fästskruv 5x6,5 mm, rostfri
9106-13	1	3	Frigångskrans, 14t, M30 x 1g	5860	1	26	Bricka
9106-14	1	5	Anslutning	9304-62	1	27	Remspännare
9000-15	1	5	Låsring SgH 028	9304-63	1	28	Bygel
19001-6	2	6	Kullager SKF 6001-2Z	9304-32	1	29	Skruv MRT, M5 x 40 mm
9300-17	1	8	D:o 5 mm	9100-21	1	30	Spännrulle SMST
9010-38	1	9	Låspinne 5 x 18 mm	9100-22	2	31	Distanshylsa
9000-12	1	10	Kedjesträckare, per par	14358	1	32	Skruv M6S, M8 x 40 mm
5799	2	11	Mutter	5844	1	33	Låsmutter M8
9304-207	1	12	Belastningsratt	9304-23	1	34	Fjäder
5843-9	1	13	Låsmutter M6	9326-162	1	35	Vevsensor med kabel 100 mm
5863	1	14	Bricka M6	9326-59	2	36	Skruv RXK, B8 x 6,5 mm
9304-267	1	15	Täckpropp	9300-66	4	37	Fäste för kabel
9304-21	1	16	Spännaxel	9326-166	1		Fäste för sensor
9304-30	1	17	Cylinderpinne 4 x 18 mm	9103-40	2		Skruv B4 x 6,5 mm
9304-27	2	18	Lagerbussning	9326-262	1		Kabel 850 mm
9304-24	1	19	Returfjäder	9326-267	1	38	Digitalmätare
9304-22	1	20	Belastningsrulle	2172	1		Batteri 1,5 V 12 x 50 mm, R6
9304-28	1	21	Stoppskruv, MT6SS, M5 x 10 mm	9326-163	1		Öronsensor
9304-29	1	22	D:o, MSK6SS, M5 x 8 mm	9339-91	1		Bröstbälte (tillbehör)
9304-25	1	23	Gummiricka 18,3x10x3mm				