


Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9300-5	1	1	Stödrör, främre	9300-210	1	19	Pedal 9/16", par
9300-6	1	2	Stödrör, bakre	9300-207	1	20	Rem för pedal, par
9300-7	4	3	Plastfot, blå	4992-5	1	21	Sadel
9000-27	2	4	Transporthjul	9300-114	1	22	Sadelklamma
9000-28	2	5	Lagerbussning för d:o	9300-113	1	23	Sadelstolpe
14359	2	6	Fästbult för d:o, M 8 x 45 mm	9300-115	1	24	Bussning för d:o
5844	6	7	Låsmutter M 8	9300-118	1	25	Låsskruv
9300-12	2	8	Skruv MVBF M 8 x 16 mm	9300-116-1	1	26	Tryckbricka
9300-10	5	9	Täckplatta	9300-117	1		O - ring
9306-10	5	10	Plastplugg	9300-266	1	27	Styre komplett
9300-55	1	11	Kedja 116 länk	1069-5	2	28	.Styrplugg
1109	1		.Kedjelås	9100-107	1	29	Styrstamsskruv komp. m. vred
9300-50	1	12	Kedjeskydd	9300-401	1	30	Vevsats, komplett 52 T
9300-51	1	13	D:o, fram	8966-175	1	31	Kassetvlager, komplett
9300-52	1	14	Sidoskydd	8523-2	2	32	Plastknopp
9300-54	1	15	D:o, fram	8523-115	2	33	Skruv M6S 8.8 M8x1x20 FZB
5673-9	4	16	Fästskruv LKT-TT 5 x 12 mm, rostfri	9300-268	1	34	Kil
5675-9	2	17	D:o, 5 x 6,5 mm, rostfri	5864	1	35	Bricka
9300-53	1	18	Fäste för skydd	9301-2	1	36	Ram

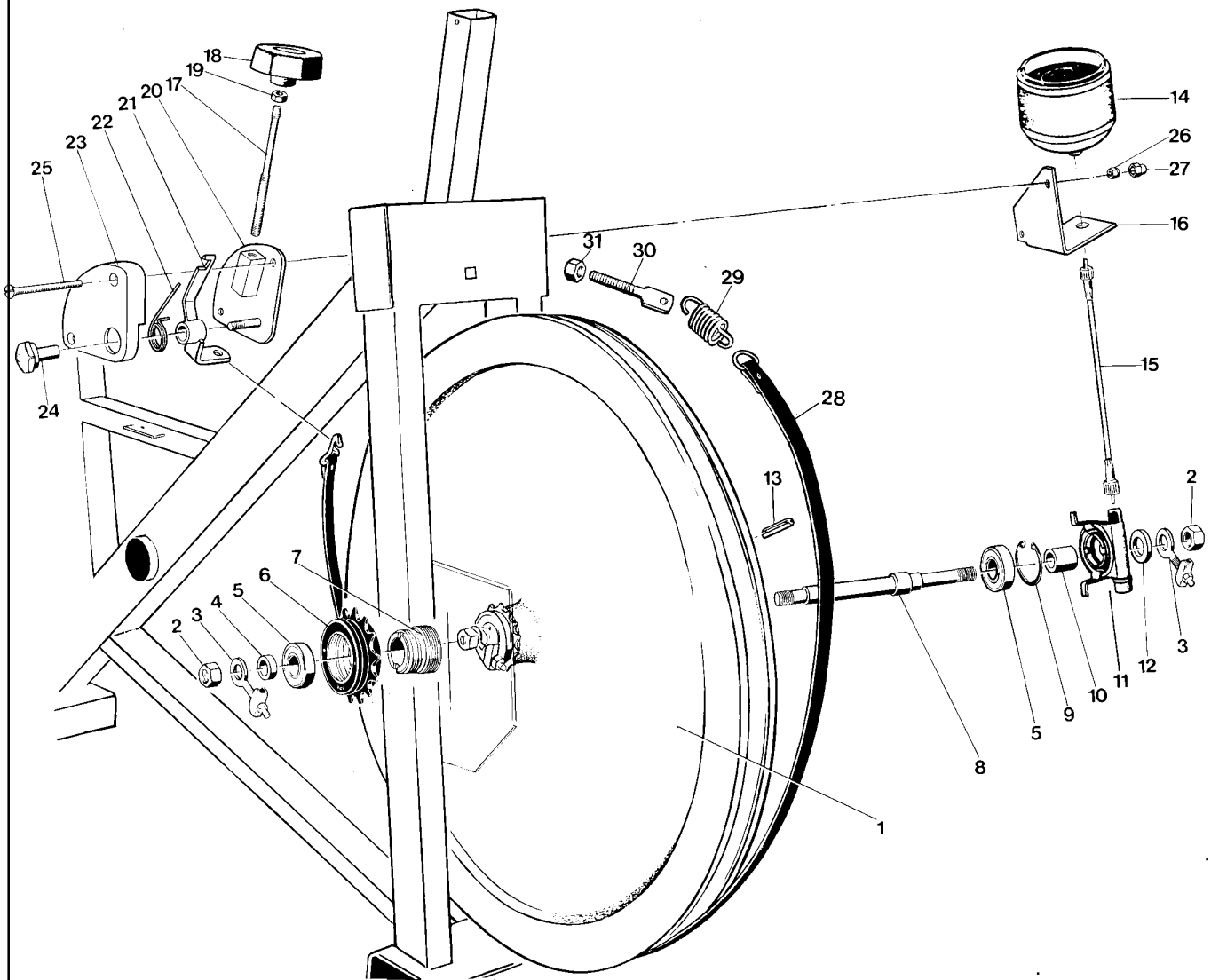

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9300-3	1	1	Bromshjul komplett	9306-21	1	17	Spännskruv M 8
5799	2	2	.Mutter	9100-25	1	18	Ratt M 8
9000-12	1	3	.Kedjesträckare	5775	1	19	Mutter M 8
9000-17	1	4	.Distanshylsa 5 mm	9306-27	1	20	Spännplatta M 8
19001-6	3	5	.Kullager SKF 6001-2Z	9106-31	1	21	Spännarm
9106-13	1	6	.Frigångskrans 14 t, M30 x 1 g	9106-29	1	22	Fjäder
9106-14	1	7	.Anslutning	9106-28	1	23	Kåpa
9300-18	1	8	.Axel, längd 132 mm	9106-27	1	24	Hylsmutter
9000-15	1	9	.Låsring SgH 028	9306-25	2	25	Skruv MFS, 5 X 70 mm
9300-16	1	10	.Distanshylsa 16 mm	5842-9	2	26	Låsmutter M 5
9327-62	1	11	.Navanslutning	9306-24	2	27	Mutterskydd, plast
5581	1	12	.Bricka, refflad	9306-35	1	28	Bromsrem
9010-38	1	13	.Låspinne 5 x 18 mm	9306-31	1	29	Fjäder
9327-61	1	14	Hastighetsmätare	9008-123	1	30	Justerskruv
9327-64	1	15	Hastighetsmätarkabel 300 mm	5770	1	31	Mutter
9306-62	1	16	Fäste för hastighetsmätare				