



Fr. o m tillverkningsnummer P 94095

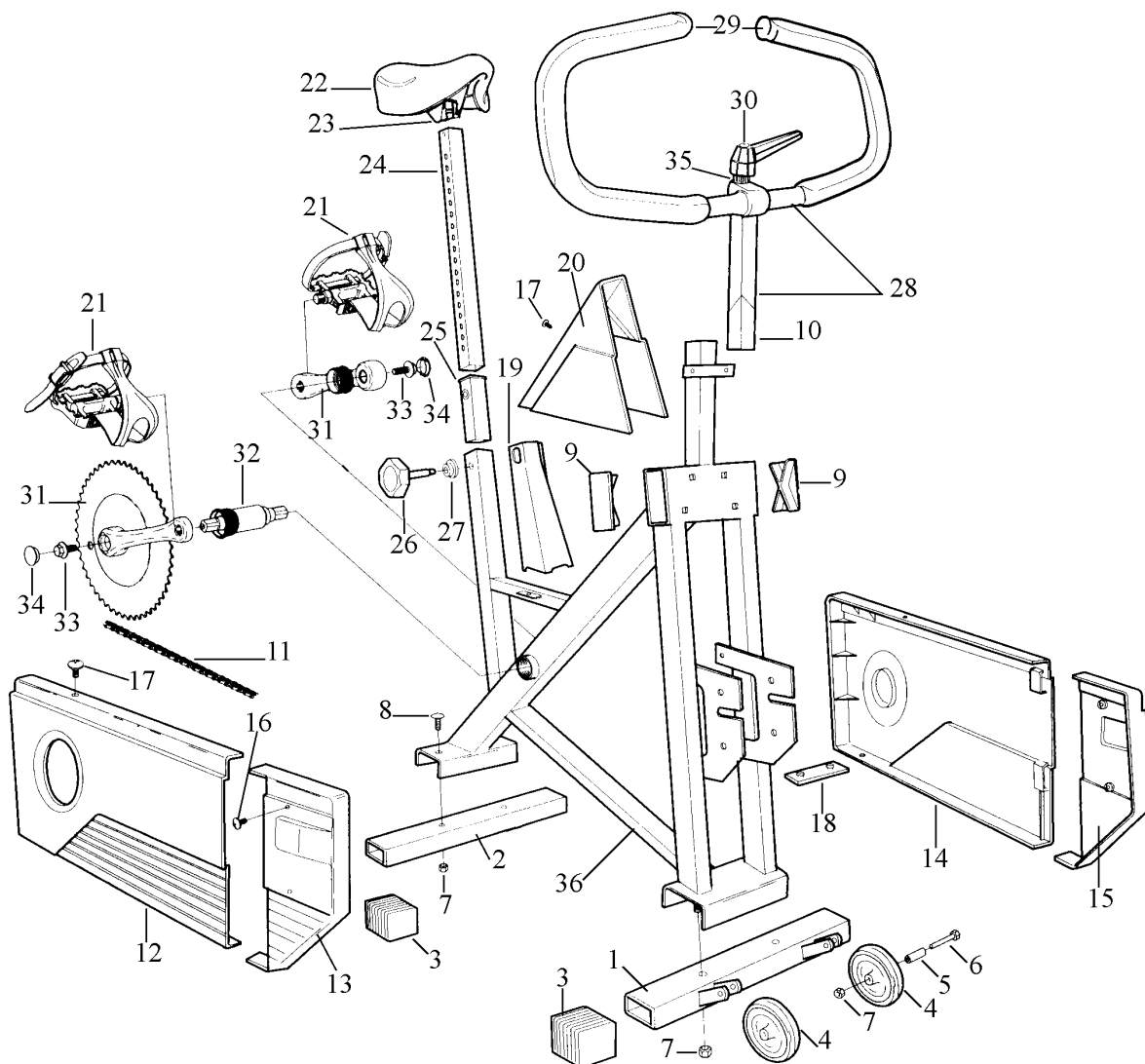

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr	Benämning
9334-5	1	1	Stödrör, främre	4992-5	1	22	Sadel
9334-6	1	1	Stödrör, bakre	9300-114	1	23	.Sadelklamma
9300-7	4	3	Plastfot, blå	9300-113	1	24	Sadelstolpe
9000-27	2	4	Transporthjul	9300-115	1	25	Bussning för d:o
9000-28	2	5	Lagerbussning för d:o	9300-118	1	26	Låsskruv
14359	2	6	Fästbult för d:o, M 8 x 45 mm	9300-116-1	1	27	Tryckbricka
5844	6	7	Låsmutter M 8	9300-117	1		O - ring
9300-12	2	8	Skruv MVBF M 8 x 16 mm	9300-266	1	28	Styre komplett
9300-10	5	9	Täckplatta	1069-5	2	29	.Styrplugg
9300-268	1	10	Expanderkil	9100-107	1	30	Styrstamstamskruv med vred
9300-55	1	11	Kedja 116 länk	9100-106	1		.Vred
1109	1		.Kedjelås	9300-401	1	31	Vevsats komplett
9300-50	1	12	Kedjeskydd	8966-175	1	32	Kasettvevlager komplett
9300-51	1	13	D:o, fram	8523-115	2	33	Skruv M6S 8.8 M8 x 1 x 20 FZB
9300-52	1	14	Sidoskydd	8523-2	2	34	Plastknopp
9300-54	1	15	D:o, fram	5864	1	35	Bricka
5673-9	4	16	Fästskruv LKT-TT 5 x 12 mm, rostfri	9324-1	1	36	Ram
5675-9	2	17	D:o, 5 x 6,5 mm, rostfri				
9300-53	1	18	Fäste för skydd				
9300-56	1	19	Sadelrörskåpa				
9300-57	1	20	Ramkåpa				
3293-7	1	21	Pedal 9/16", par				
8495-7	1		Rem till pedal, par				

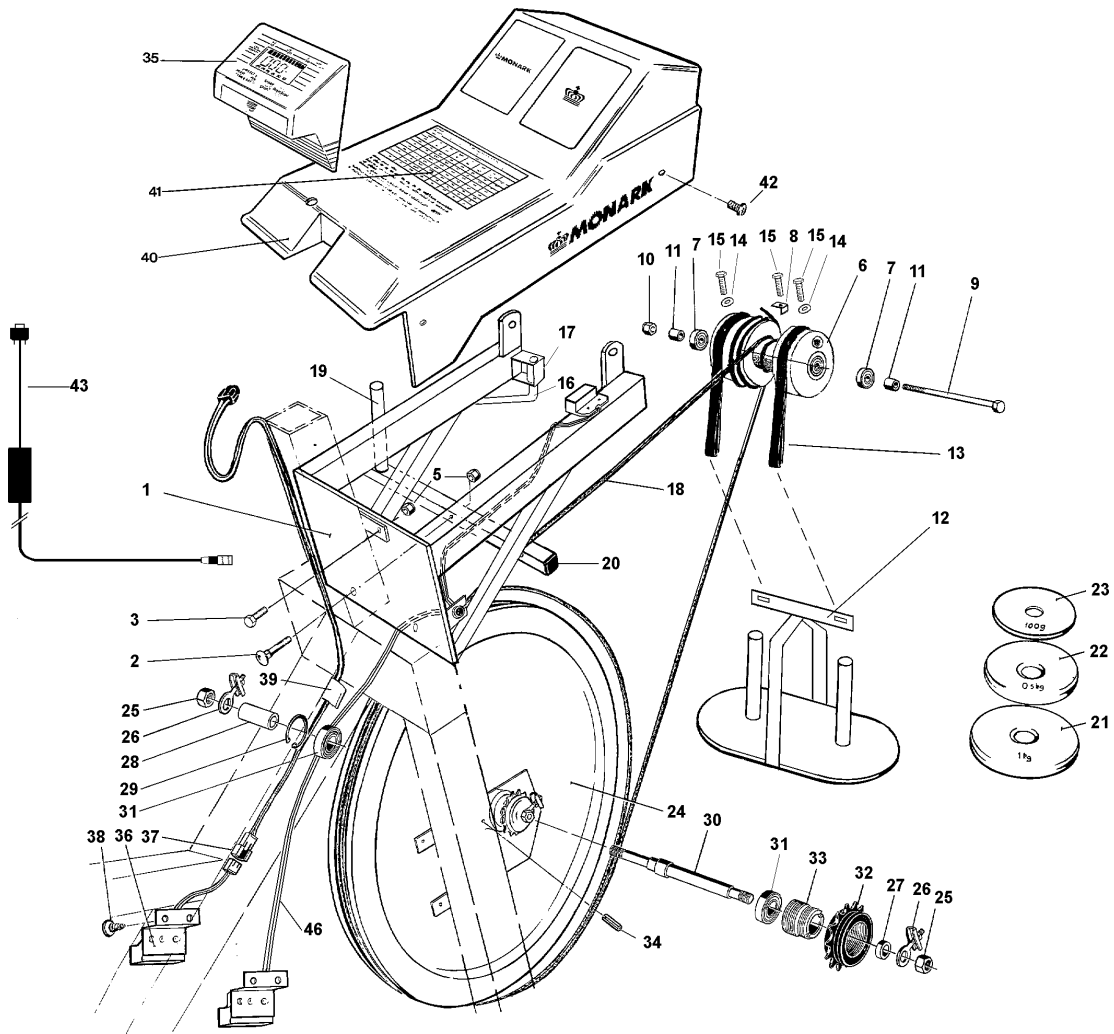

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9324-9	1	1	Ram för belastningsanordning	5799	2	25	.Mutter
9300-21	2	2	Skruv MVBF 6 x 16 mm	9000-12	1	26	.Kedjesträckare
14323	5	3	Skruv M6 x 10 mm	9000-17	1	27	.Distanshylsa
5843-9	4	5	Mutter M6	9300-17	1	28	.Distanshylsa 23 mm
9324-20	1	6	Spänncentrum	9000-15	1	29	.Låsring SgH 0281
19088-6	2	7	.Kullager	9300-18	1	30	.Axel
9324-70	1	8	Låsbricka	19001-6	2	31	.Kullager 6001-2Z
14373	1	9	Skruv M8 x 150 mm	9106-13	1	32	.Frigångskrans 14 t M30 x 1g
5844	1	10	Mutter	9106-14	1	33	.Anslutning för d:o
9324-21	2	11	Distanshylsa	9100-38	1	34	.Låspinne 5 x 18 mm
9324-25	1	12	Viktkorg 1 kg	9300-160	1	35	Mätare
9324-26	2	13	Upphågningsrem	9326-59	1		.Fästskruv för d:o
5863	2	14	Bricka M6	2172	2		.Batteri för d:o
14323	3	15	Skruv M6S 6 x 16 mm	9300-165	1	36	Vevsensor med kabel
9324-10	1	16	Stopparm	9300-164	1	37	Skarvkabel
9324-11	1	17	Skruv MC6S M4 x 8 mm fzb	9326-59	2	38	Skruv RXK B8 x 6.5 fzb
9324-30	1	18	Bromsrem	9300-66	5	39	Fäste för kabel
9324-29	1	19	Vikthållare	9300-69	1		Minikanal för kabel
9302-28	2	20	Plastplugg	9302-108	1	40	Instrumentkåpa
9102-26	4	21	Vikt 1 kg	1825-639	1	41	.Belastningsdekål
9102-27	1	22	Vikt 0,5 kg	5675-9	4	42	Fästskruv för kåpa
9102-30	4	23	Vikt 0,1 kg	9334-66	1	43	Datorkabel
9300-3	1	24	Bromshjul med frigångskrans	9334-67	1		Programdiskett
				9334-68	1		Programmanual
				9334-65	1	46	Sensorkabel komplett