


Fr o m. tillverkningsnummer P 93713.

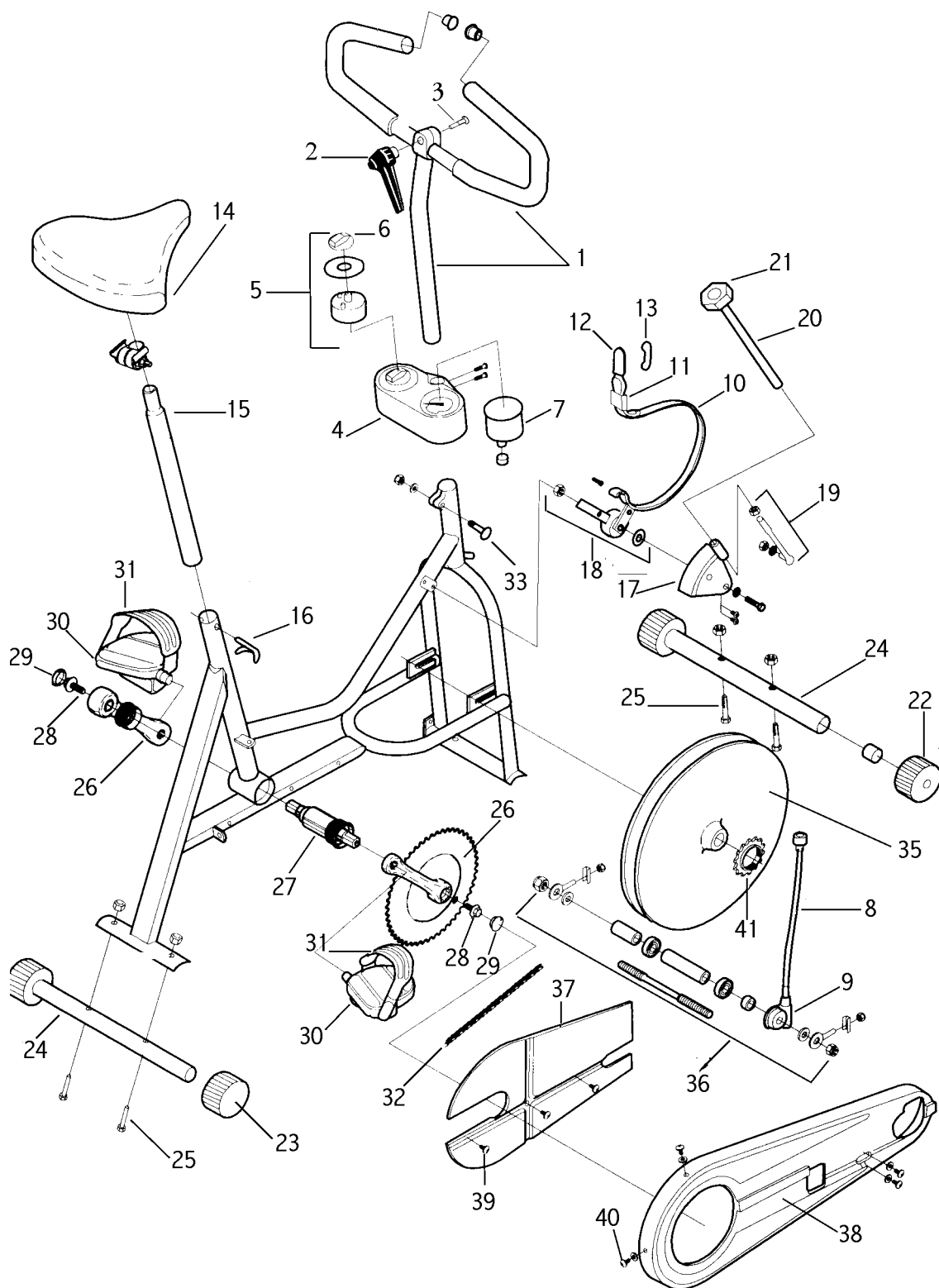

Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9355-265	1	1	Styre komplett
9100-106	1	2	.Vred
71297	1	3	.Bult
77853	1	4	Instrument, komplett
77841	1	5	.Timer komplett
77840	1	6	.Timerknapp
32835	1	7	.Hastighetsmätare
32839	1	8	.Hastighetsmätarkabel
77838	1	9	.Navanslutning
9355-35	1	10	Bromsrem komplett
9006-37	1	11	.Spänne för bromsrem
62655	1	12	Fjäder
32843	1	13	Kalibreringsmått
4991-5	1	14	Sadel
75795	1	15	Sadelstolpe
75287	1	16	Lås för sadelstolpe
66627	1	17	Skala komplett
66609	1	18	Belastningsanordning
66626	1	19	Belastningsarm
9055-85	1	20	Belastningsratt komplett
9155-25	1	21	Belastningsratt, enbart
9355-27	2	22	Transporthjul fram
9355-28	2	23	Transporthjul bak
77979	2	24	Stödrör, fram och bak
9302-27	4	25	Skruv för stödrör
9300-401	1	26	Vevsats komplett
8966-175	1	27	Kasettvevlager
8523-115	2	28	Skruv M6S 8.8 M8 x 1 x 20 FZB
8523	2	29	Plastknopp
9300-215	1	30	Pedal 9/16", par
9300-207	1	31	Rem för pedal, per par
66628	1	32	Kedja
66639	1	33	Låsskruv för styrstam
64960	1	34	Ram
66446	1	35	Bromshjul komplett
66417	1	36	Bromshjullager
9355-52	1	37	Inre kedjeskydd komplett
9355-50	1	38	Kedjeskydd
9126-75	6	39	Fästskruv (spårskruv)
5675-9	6	40	Fästskruv (torx)
76441	1	41	Frigångskrans